




Foam DRESSING 문

의약외품 | 멸균제품 | 일회용 | 재사용금지

상처엔 처음부터 끝까지

MEDIFOAM® BAND

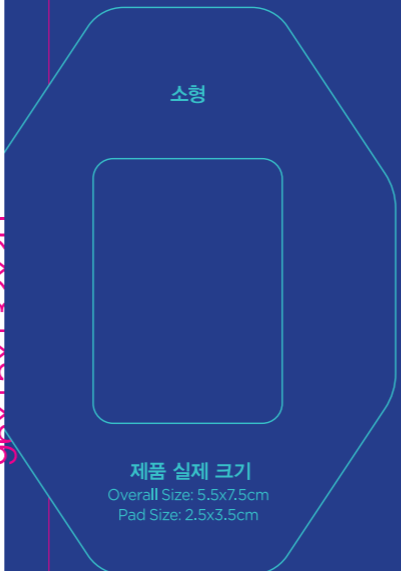

9.6x15x1.2x2.0

소형

제품 실제 크기
Overall Size: 5.5x7.5cm
Pad Size: 2.5x3.5cm

제품명 메디폼 밴드

전성분

폴리우레탄 점착필름, 폴리우레탄 기포제

효능·효과

상처부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호

용법·용량

환부를 세척(생리식염수 세척 등)하고 흡수체 (유백색층)를 환부에 직접 접촉하도록 부착합니다. 삼출물이 과다 흡수되면 드레싱을 교환합니다.

사용상의 주의사항

이 제품은 Hydrochloric-용액(Eusol 등) 또는 과산화수소수와 같은 산화제(Oxidising Agent)와 함께 사용하면 기포성 충전제가 파괴될 수도 있으므로 주의해야 합니다.

제조번호

하단 별도표기

사용기한

하단 표시일까지

중량

51.4mg/㎡

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

판매자

한국메디파마(유)

서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어3F

제품문의처 080-800-5689

www.medifoam.co.kr

제조사

(주)제네웰

경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2

www.genewel.com

이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

사용방법



1 상처 부위를 깨끗이 씻고 완전히 건조시킵니다.



2 점착제가 붙은 면의 이형지를 제거 후 상처 부위에 붙입니다.



3 상처에 적용 후 잘 붙을 수 있도록 폼을 눌러줍니다.



4 삼출물이 과다 흡수되면 드레싱을 교환합니다.

© : 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.