



FOAM
DRESSING
메디폼

의약외품 | 멸균제품 | 일회용 | 재사용금지

상처엔 처음부터 끝까지

MEDIFOAM BAND

일반형



제품 실제 크기
Overall Size: 3x7cm
Pad Size: 1.5x3.4cm

제품명 메디폼 밴드

전성분

폴리우레탄 점착필름, 폴리우레탄 기포제

효능·효과

상처부위, 환부 등의 분비물 흡수 및 보호

용법·용량

환부를 세척(생리식염수 세척 등)하고 흡수체

(유백색층)를 환부에 직접 접촉하도록 부착합니다.

삼출물이 과다 흡수되면 드레싱을 교환합니다.

사용상의 주의사항

이 제품은 Hydrochloric Acid(Eusol 등) 또는 과산화

수소수와 같은 산화제(Oxidising Agent)와 함께 사용하면

기포성 충전제가 파괴될 수도 있으므로 주의해야 합니다.

제조번호 하단 발도표기

사용기한 하단 표시일까지

중량 51.4mg/cm²

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

판매자 한국민디파미(유)

서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어3F

제품문의처 080-800-5689

www.medifoam.co.kr

제조사 (주)제네웰

경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2

www.genewel.com

이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결
기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

MP-IN-MB-일반형-OTC (77x15x122x20mm)

사용방법



1 상처 부위를 깨끗이 씻고 완전히 건조시킵니다.



2 점착제가 붙은 면의 이형지를 제거 후 상처 부위에 붙입니다.



3 상처에 적용 후 잘 붙을 수 있도록 몸을 눌러줍니다.



4 삼출물이 과다 흡수되면 드레싱을 교환합니다.

© : 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.