

전

후

273mm

120mm

제인 20-4976호

의료기기 멸균제품 일회용 재사용금지

메디폼[®]H 액티브 Active

[형상 및 구조]

본 제품은 창상 부위를 보호하고, 체액 손실과 오염을 방지하기 위한 목적으로 사용되는 창상피복재이다. 폴리우레탄 필름에 하이드로콜로이드 점착제가 도포되어 있는 시트 형태로 사용이 용이하며 점착면은 박리제로 보호되어 있다. 상처 접촉면의 하이드로콜로이드 성분이 상처의 삼출액을 흡수하고 창상 부위를 습윤 상태로 유지시킨다. 본 제품은 국소하이드로겔창상피복재로 감마멸균 되어 있으며 일회용으로 재사용을 금지한다.

[사용목적]

삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액손실 및 오염 방지를 위해서 사용하는 친수성 폴리머제 피복재

[사용방법]

사용 전의 준비사항

- 가. 제품의 포장에 파손이 없는지 확인하고, 유효기간 내 제품인지 확인한다.
- 나. 제품의 외관상 변형이나 이물질 부착 등을 확인한다.
- 다. 사용 전에 사용방법을 충분히 숙지한다.

사용방법

- 가. 상처 부위와 그 주변을 깨끗한 물 또는 생리식염수로 세척하여 건조한다.
- 나. 제품을 포장에서 꺼낸 후 상처 부위를 충분히 덮을 수 있는 사이즈를 선택하거나 적당한 크기로 자른다.
- 다. 박리지를 제거한 후 하이드로콜로이드 점착면을 상처 부위에 부착한다.
- 라. 제품이 상처부위의 삼출액을 흡수하여 하얗게 부풀어 오르면 새 것으로 교체한다.

사용 후의 보관 및 관리방법

- 가. 본 제품은 멸균 처리된 일회용 제품이므로 사용 후 남은 부분은 폐기하고 재사용을 금지한다.

[사용시 주의사항]

일반적 주의

- 가. 고온 다습한 곳을 피해 보관하여야 한다.
- 나. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 다. 포장이 파손된 제품은 사용하지 않는다.

사용상 주의

- 가. 사용 전 사용방법을 충분히 숙지한다.
- 나. 민감한 피부를 가진 환자는 사용 전 의사나 약사와 상의하여야 한다.

부작용

- 아래와 같은 증상이 있을 경우에는 본 제품을 사용하지 않는다.
- 가. 발열
- 나. 가려움
- 다. 알러지 반응
- 라. 발진
- 마. 피부통증

금기사항

- 가. 감염되거나 3도 화상 등의 깊은 상처에는 사용하지 않는다.
- 나. 눈과 입에는 사용하지 않는다.
- 다. 본 제품은 멸균 처리된 일회용 의료기기이므로 재사용을 금지한다.

제조사



㈜제이와이팜
경기도 광주시 오포읍
오포로 589-21

제조의뢰자



㈜제네웰와성지사
경기도 화성시 향남읍 솔대상동길 281-2
www.genewel.com

판매자



한국인디파마(유)
서울특별시 중구 한강대로 416
서울스퀘어 3F
제품문의처 080-800-5689
www.medifoam.co.kr

제인 20-4976호

의료기기 멸균제품 일회용 재사용금지

메디폼[®]H 액티브 Active

[제품명] 메디폼H active

[품목명] 국소하이드로겔창상피복재

[모델명] DW100100D

[저장방법] 직사광선을 피해 실온에서 보관한다.

[사용기한] 별도표기

[포장단위] 별도표기

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다

®: 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

첨부문서 작성년월: 2021년 3월

Rev. 00

제조사



㈜제이와이팜
경기도 광주시 오포읍
오포로 589-21

제조의뢰자



㈜제네웰와성지사
경기도 화성시 향남읍 솔대상동길 281-2
www.genewel.com

판매자



한국인디파마(유)
서울특별시 중구 한강대로 416
서울스퀘어 3F
제품문의처 080-800-5689
www.medifoam.co.kr

품명	메디폼H 액티브 10x10_파우치_210325	도수	총 1도	후가공	-	비고	-
규격	120 mm X 273 mm						
담당자	-		Blue 072 C				
인쇄소	-						
수정사항	-						