

전

후

273mm

120mm

제인04-498호
의료기기 | 멸균제품 | 일회용 | 재사용금지

메디폼®

[항상 및 주의]
본 제품은 창상의 오염을 방지하고 보호하는 목적으로 사용되는 창상파복제로서, 반투과성 폴리우레탄 필름과 폴리우레탄 폼으로 구성됩니다.

[성능 및 사용목적]
창상의 오염 방지 및 보호
- 창상이란 찰과상, 화상, 티박상(명), 수술창, 욕창 등의 외과적 상처를 말합니다.

[사용 및 조작 방법]
가. 사용 전의 준비사항
1) 본 제품은 의료용 및 사용목적 이외의 사용을 금합니다.
2) 본 제품은 멸균되어 있으므로 환부 접촉면의 오염에 주의하여 개봉 후 바로 사용합니다.
3) 멸균팩이 개봉 또는 파손되어 있는 것은 사용하지 않습니다.
나. 사용방법
1) 상처부위를 소독액 또는 생리식염수로 깨끗이 씻습니다. 단, 감염된 상처에 소독액을 사용하는 경우 소독액이 남지 않도록 멸균된 생리식염수로 씻습니다.
2) 상처부위의 크기보다 2.5cm 큰 폼 사이즈의 제품을 선택한 후 멸균팩에서 꺼냅니다.
3) 안쪽의 보호필름을 벗긴 후, 보호필름이 붙어있던 면으로 상처부위에 붙입니다.
4) 본 폼의 주위를 봉대 Surgical Tape, 반창고 등으로 고정합니다.
- 동봉된 외과용드라이프(고경용부직포, 경인 제신08-60호)를 사용하여 제품을 고정하십시오.
5) 상처의 삼출액이 많고 삼출액의 누출이 예상되는 경우에는 자주 교환해 주고, 삼출액의 누출이 없으며 감염의 징후가 없는 경우에는 3-4일간 사용 후에 교환합니다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법
1) 본 제품은 일회용으로 재사용을 금합니다.
2) 고온다습한 곳을 피하고 실온 보관합니다.
3) 직사광선이 쏘이지 않는 곳에 보관합니다.

라. 사용 시 주의사항
1) 금기사항
본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알레르기 반응이나 감염 증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사나 약사의 지시에 따라 적절한 치료를 받도록 합니다.
2) 경고 또는 주의사항
① 본 제품의 배면층에서 삼출액의 흡수상태를 관찰할 수 있으므로 가장자리로부터 약 90%까지 삼출액이 흡수 또는 확장된 때에 드레싱을 교환합니다.
② 출혈이 심한 상태에서는 지혈처치 후 사용합니다.
③ 감염된 창상(발적, 종창, 통증, 열감, 강한 악취 및 농의 배출 등의 증상이 있는 창상)에는 이물이나 농, 고사조직과 같은 세균증식의 원인을 제거한 후 사용합니다.
④ 본 제품은 Disposable(1회용) 제품이므로 재사용을 금하고, 사용한 제품은 다른 병원 폐기물과 함께 폐기 처분해 주십시오.

제조사
Genevel (주)제네웰 의 상 지 사
경기도 화성시 향남읍 송터상두길 281-2
www.genevel.com

판매자
한국먼디파마(유)
서울특별시 동구 한강대로 416번지
서울스퀘어 3층
제품문의처 080-800-5689

제인04-498호
의료기기 | 멸균제품 | 일회용 | 재사용금지

메디폼®

[품목명] 국소폼제창상파복재
[모델명] 발도표기
[지장방법] 실온보관
[사용기한] 발도표기
[포장단위] 발도표기

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

®: 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.

첨부문서 작성년월 : 2018년 8월
[Rev. 04]

제조사
Genevel (주)제네웰 의 상 지 사
경기도 화성시 향남읍 송터상두길 281-2
www.genevel.com

판매자
한국먼디파마(유)
서울특별시 동구 한강대로 416번지
서울스퀘어 3층
제품문의처 080-800-5689